

Willi Fox – Alkoholtest

Testanleitung (IFU)

Einweg Alkohol - Atemtest

1. Anwendungsbereich

Der **Willi Fox** – Alkohol - Atemtest verwendet das international anerkannte Atem Test Prinzip um den Alkohol Spiegel zu messen.



Der **Willi Fox** – Alkohol - Atemtest ist NF (=„Norme française“) zertifiziert. D.h. damit wurde offiziell bestätigt, dass der Test den Anforderungen entspricht und korrekt funktioniert und somit von den französischen Behörden anerkannt wird.

2. Zusammenfassung des Testprinzips

Das Einwegröhrchen enthält gelbe Kristalle, welche ihre Farbe zu grün verändern sobald Alkohol vorhanden ist. Wenn ein gewisses Volumen von Atemluft das Röhrchen passiert hat (nach dem Aufblasen des Beutels), zeigt die Länge des grün verfärbten Stücks im Röhrchen, ob der Alkoholpegel über oder unter der erlaubten Grenze ist.

3. Kalibrierung/ Interpretierung der Messwerte

0,25g/L Alkoholgehalt des Atemwerts entspricht 0,5 g/L Blutalkoholwert.

4. Inhalt der Testpackung

- Teströhrchen
- Beutel um Atemluft zu sammeln
- Farbskalakarte
- 1 Testanleitung

5. Zusätzlich benötigtes Material (nicht mitgeliefert)

- (Stopp)uhr

6. Lagerung und Haltbarkeit

Die **Willi Fox** - Alkoholtests können im verschlossenen Beutel bei Raumtemperatur (2-40°C) bis zum angegebenen Verfallsdatum aufbewahrt werden.

Setzen Sie die **Willi Fox** – Alkoholtests nicht direktem Sonnenlicht aus.

7. Wichtige Hinweise

- *Nur zum Einmalgebrauch*
- *Lesen Sie vor Ausführung des Tests die Testanleitung genau durch.*
- *Das Teströhrchen enthält starke Oxidationsmittel. Behandeln Sie es mit Vorsicht, halten Sie es ausserhalb der Reichweite von Kindern und entsorgen Sie es sorgfältig im Müll.*
- *Bei Kontakt dieser Oxidationsmittel mit den Augen oder der Haut waschen Sie die Chemikalie sogleich sorgfältig mit Wasser weg und suchen Sie einen Arzt auf.*
- *Zeigt der Test ein Ergebnis am oder über dem gesetzlich zugelassen Grenzwert, führen Sie auf keinen Fall ein Fahrzeug!*
- *Es wird empfohlen, eine Stunde nach dem Konsum des letzten alkoholischen Getränks den Test durchzuführen, bevor Sie ein Fahrzeug führen.*
- *Verwenden Sie nur einen völlig aufgeblasenen Beutel! Falls der Beutel nur teilweise aufgeblasen ist, pressen Sie die gesamte Luft raus und blasen ihn erneut auf, bevor Sie das Teströhrchen an diesem anbringen und die Luft des Beutels durch das Röhrchen pressen.*
- *Test nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.*
- *Test nicht verwenden, wenn Folienverpackung beschädigt ist.*
- *Test umgehend (innerhalb höchstens einer Stunde) nach Öffnung der Folienverpackung verwenden.*
- *Der Test kann nur bei einer Temperatur von 2-40°C des Teströhrchens durchgeführt werden.*
- *Bitte beachten Sie die angegebenen Auswertungszeiten.*
- *Test nur unter angegebenen Temperaturen lagern und transportieren, soweit keinem direktem Sonnenlicht aussetzen.*

8. Vorbereitung/ zu Beachten bevor der Testdurchführung


- **Der Test darf frühestens 20 Minuten nach Konsum des letzten Getränks durchgeführt werden!**
- **Rauchen Sie nicht unmittelbar vor der Testdurchführung**

9. Testdurchführung und Auswertung


Beachten Sie bitte die Erläuterungen zur Vorbereitung und die ,Wichtigen Hinweise.

Das Teströhrchen (im verschlossenen Folienbeutel) sollte vor Durchführung des Tests auf Raumtemperatur (15°C bis 30°C) gebracht werden. Öffnen Sie den Folienbeutel der Testkassette erst unmittelbar bevor Sie den Test durchführen.


1. Brechen Sie die beiden Kappen an den Enden des Teströhrchens ab.

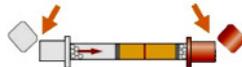

2. Schütten Sie die ungefährlichen weissen Kristalle (Trockenmittel) in den beiden Enden aus dem Röhrchen in den Müll.

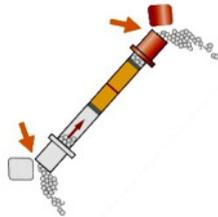

3. Blasen Sie den Beutel mit einem grossen Atemstoss auf.

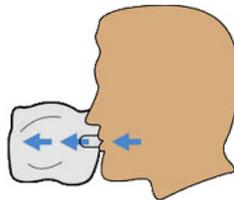

4. Schieben Sie das **weisse** Ende des Teströhrchens in den Beutelhals.



5. Pressen Sie den Beutel mit beiden Händen langsam und gleichmässig zusammen, sodass die gesammelte Atemluft stetig in ca. **20 Sekunden** durch das Teströhrchen entweicht.



6. Lesen Sie das Ergebnis **nach 2 Minuten** ab.

Warten Sie nicht länger als 10 Minuten mit dem Ablesen des Ergebnisses!

Auswertung

Verwenden Sie zur Interpretation des Ergebnisses auch die mitgelieferte Farbskala!


Lesen Sie das Ergebnis nach 2 Minuten ab

Kein Alkohol wurde im Atem nachgewiesen:




- Keine grüne Verfärbung im Teströhrchen. Es befindet sich kein Alkohol im Blut oder der Alkoholspiegel liegt unter der nachweisbaren Grenze von 0.2‰.

Der Alkoholspiegel ist unter der gesetzlichen Limite von 0.5‰:

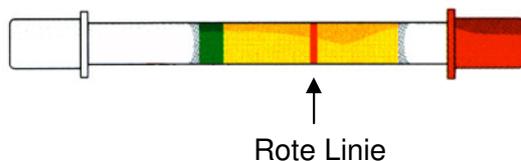

- Die grüne Verfärbung im Teströhrchen ist unterhalb der roten Linie und somit ist der Alkoholspiegel unterhalb der gesetzlichen Limite von 0.5‰.

Der Alkoholspiegel ist über der gesetzlichen Limite von 0.5‰:

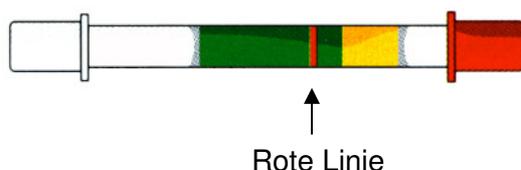

- Die grüne Verfärbung im Teströhrchen geht bis oberhalb der roten Linie und somit ist der Alkoholspiegel über der gesetzlichen Limite von 0.5‰.

10. Einsatzbereich und Grenzen

- Der **Willi Fox** – Alkohol Atemtest ergibt nur einen zuverlässigen Messwert des Alkoholspiegels des Probanden, wenn er korrekt angewandt wird.
- Das Testergebnis hat aber keine schlüssige Beweiskraft und kann nicht dazu verwendet werden um Ergebnisse von offiziellen polizeilichen oder sonstigen gesetzlich angeordneten Labortests zu entkräften.
- Der Hersteller oder Vertreiber der **Willi Fox** – Alkohol Atemtests kann nicht haftbar gemacht werden für Entscheidungen des Anwenders, die aufgrund des Tests gemacht wurden.

11. Symbolerläuterungen

	Produktnummer		Verfalldatum
	Chargennummer		Inhalt
	Lagertemperatur		Gebrauchsanweisung
	nur zum Einmalgebrauch		



Die **Willi Fox** - Alkoholtests wurden für **Willi Fox** von Redline Products Ltd. ,South Africa hergestellt und werden vertrieben durch:

Willi Fox GmbH
CH - 4001 Basel
Tel. +41 (0)61 534 74 65
Fax +41 (0)61 535 14 80
willifox@willifox.com

www.willifox.com